

Швидкий старт (Quick Start Guide) Компресійні чоботи для швидкого відновлення

Ayre™ PRO Wireless Rapid-Recovery Compression Boots



Ayre™ Pro Boots

- A** Чоботи з нейлону 420D
- B** Застібка-липучка
- C** Блискавка
- D** Камери C1, C2, C3, C4
- E** Роз'єм для зарядного пристрою



Блок керування Ayre™ Pro

- 1** 1 — Кнопка увімкнення/вимкнення та налаштування таймера
- 2** 2 — Кнопка регулювання тиску
- 2+1** 2+1 — Кнопка вибору режиму

Призначення

Пристрій Comrex Ayre™ PRO — це електричний масажер з акумуляторним живленням, який призначений для тимчасового зняття напруги, розслаблення м'язів після фізичного навантаження та покращення кровообігу в оброблюваних ділянках. Його не слід використовувати для лікування будь-яких захворювань або травм, а також на пошкодженій шкірі чи тканинах. Це не медичний пристрій і він не призначений для використання в медичних умовах.

Протипоказання

Пристрій не можна використовувати людям із підозрою або наявністю тромбозу глибоких вен, ішемічних судинних захворювань, важкого атеросклерозу, набряку легень, тяжкої серцевої недостатності, тромбозу або активних інфекцій. Його не можна застосовувати на ногах, якщо є перев'язка вен, гангрена, дерматит, відкриті рани, нещодавні пересадки шкіри, значні набряки або сильні деформації. Заборонено використання при нейропатіях, у випадках втрати чутливості до болю або коли небажане посилення венозного чи лімфатичного відтоку.

Попередження

Не ремонтувати пристрій самостійно
Не відкривати корпус
Не від'єднувати насос від чобіт
Не модифікувати пристрій
Не обслуговувати під час роботи
Не використовувати у вологому середовищі
Не занурювати у воду
Не стерилізувати в автоклаві
Не використовувати поруч із вибухонебезпечними сумішами
Після температур нижче 10°C — дати нагрітись до кімнатної
Не кидати пристрій
Пристрій може впливати на радіообладнання

Запобіжні заходи

При появі болю/подразнення — припинити використання і звернутись до лікаря
Якщо є пульсація — послабити чоботи
При діабеті або судинних захворюваннях — консультація лікаря
При використанні з нагрівальними пристроями — контроль стану шкіри

Інструкція швидкого запуску

Перед використанням прочитати повну інструкцію (comrex.com)

1. Надягнути чобіт, застібнути блискавку і липучки
2. Переконайтесь, що посадка щільна, але не тісна
3. Утримувати кнопку живлення 1 сек — увімкнення
4. За замовчуванням запускається режим F1:

-по черзі надуває 4 камери
-тиск 150 mmHg

Щоб змінити тиск:
натискати кнопку Set
для переходу до наступної камери — утримувати Set 1 сек

Щоб змінити режим:
утримувати Power + Set 2 сек

Вимкнення:
утримувати кнопку живлення 1 сек

Зарядка

Перед використанням прочитати повну інструкцію (comrex.com)

- Іконка батареї блимає під час зарядки
- Світиться постійно — коли заряджено
- Пристрій можна використовувати під час зарядки